

Perfecta

VORMSTABIEL

Comfortabel dragen in kritische omstandigheden door perfecte centrering

Sferisch Multifocaal Multifocaal Prestige Bifocaal Torisch Mini-Scleraal

De Perfecta heeft een perfecte centrering, waardoor het comfortabel dragen van deze contactlens geen uitzondering is. Door de overgang van de sferische optische zone naar een combinatie van een sferische en een conische periferie ontstaat een asferische vorm met een edge lift, welke de stofwisseling uitstekend verzorgt.

TOEPASSING

De constructie van de Perfecta maakt het mogelijk om de contactlens toe te passen in kritische omstandigheden zoals bij ongunstige traansamenstelling, grote gevoeligheid en lange draagtijden.

VOORDELEN

+ Comfortabel

GEBRUIKSDUUR

12 - 24 maanden

(afhankelijk van het gekozen materiaal)

Parameters

B.C.R.	6.00 - 10.50 per 0.05 oplopend
STERKTE	+/- 40.00 per 0.25 oplopend
DIKTE	0.16 bij -3.00
LENSDIAMETER	7.00 - 12.50 per 0.10 oplopend

Aanpas-advies

CORNEA

ASTIGMATISME

K vlak + of -

0.00 > 0.50	+ 0.05
0.75 > 1.25	Gelijk aan
1.50 > 2.00	- 0.05
2.25 > 2.50	- 0.10
2.75 > 3.00	- 0.15 of Randtorisch (R.T)
3.25 > 3.50	- 0.20 R.T of Exception
3.75 > 4.00	- 0.25 R.T of Exception
4.25 > 4.50	- 0.30 R.T of Exception

Diameter keuze

2 mm kleiner dan de verticale corneadiameter.

Probleemoplossing

Indien de centrale passing goed is maar te weinig perifere lift heeft, bestel dan de Perfecta-Vlak uitvoering.