

Sferisch     Multifocaal     Multifocaal Prestige     Bifocaal     Torisch     Mini-Scleraal

## TOEPASSING

Door de overgang van de sferische optische zone naar een sferische periferie in de Tricurve contactlens ontstaat een pasvorm welke de stofwisseling uitstekend verzorgt. Deze constructie maakt het mogelijk in kritische omstandigheden de periferie individueel zodanig aan te passen dat er een optimale pasvorm ontstaat.

## VOORDELEN

- + Flexibele pasvorm
- + Individueel maatwerk

## GEBRUIKSDUUR

12 - 24 maanden  
(afhankelijk van het gekozen materiaal)

## Parameters

<b>B.C.R.</b>	6.00 - 10.00 per 0.05 oplopend
<b>STERKTE</b>	+/- 40.00 per 0.25 oplopend
<b>DIKTE</b>	0.20 bij -3.00 per 0.25 oplopend
<b>LENSDIAMETER</b>	8.00- 12.50 per 0.10 oplopend
<b>OPTISCHE ZONE</b>	OZ kan gekozen worden tussen 1.60 en 2.50 mm kleiner dan de lensdiameter
<b>PERIFERIE</b>	aan te passen per +/- 0.10

## Aanpas-advies

<b>CORNEA</b>	<b>K VLAK + OF -</b>
<b>ASTIGMATISME</b>	
0.00 > 0.50	+ 0.05
0.75 > 1.25	Gelijk aan
1.50 > 2.00	- 0.05
2.25 > 2.50	- 0.10
2.75 > 3.00	- 0.15 of Randtorisch (R.T)
3.25 > 3.50	- 0.20 R.T of Exception
3.75 > 4.00	- 0.25 R.T of Exception
4.25 > 4.50	- 0.30 R.T of Exception

## Diameter keuze

2 mm kleiner dan de verticale corneadiameter.