

Orion / asferisch

VORMSTABIEL

De rand asferische contactlens voor een grote optische zone

Sferisch Multifocaal Multifocaal Prestige Bifocaal Torisch Mini-Scleraal

TOEPASSING

De Orion is een rand asferische contactlens die wordt toegepast indien er een grote optische zone noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een grote pupilopening.

VOORDELEN

- + Grote optische zone
- + Eenvoudig over te stappen naar bi- of multifocaal
- + Ook leverbaar in rand-, buiten- en bi-torisch

GEBRUIKSDUUR

12 - 24 maanden
(afhankelijk van het gekozen materiaal)

Parameters

B.C.R.	6.00 - 10.00 per 0.05 oplopend
STERKTE	+/- 40.00 per 0.25 oplopend
DIKTE	0.16 bij -3.00
LENSDIAMETER	8.00 - 12.50 per 0.10 oplopend
EXCENTRICITEIT	0.40 , 0.60 en 1.00, Orion Q 0.60 (andere excentriciteiten zijn ook mogelijk).

Aanpas-advies

CORNEA

ASTIGMATISME

K VLAK + OF -

0 .00 > 0.50	+ 0.05
0.75 > 1.25	Gelijk aan
1.50 > 2.00	- 0.05
2.25 > 2.50	- 0.10
2.75 > 3.00	- 0.15 of Randtorisch (R.T)
3.25 > 3.50	- 0.20 R.T of Exception
3.75 > 4.00	- 0.25 R.T of Exception
4.25 > 4.50	- 0.30 R.T of Exception

Diameter keuze

2 mm kleiner dan de verticale corneadiameter.